


FLORIDA PROBE[®]

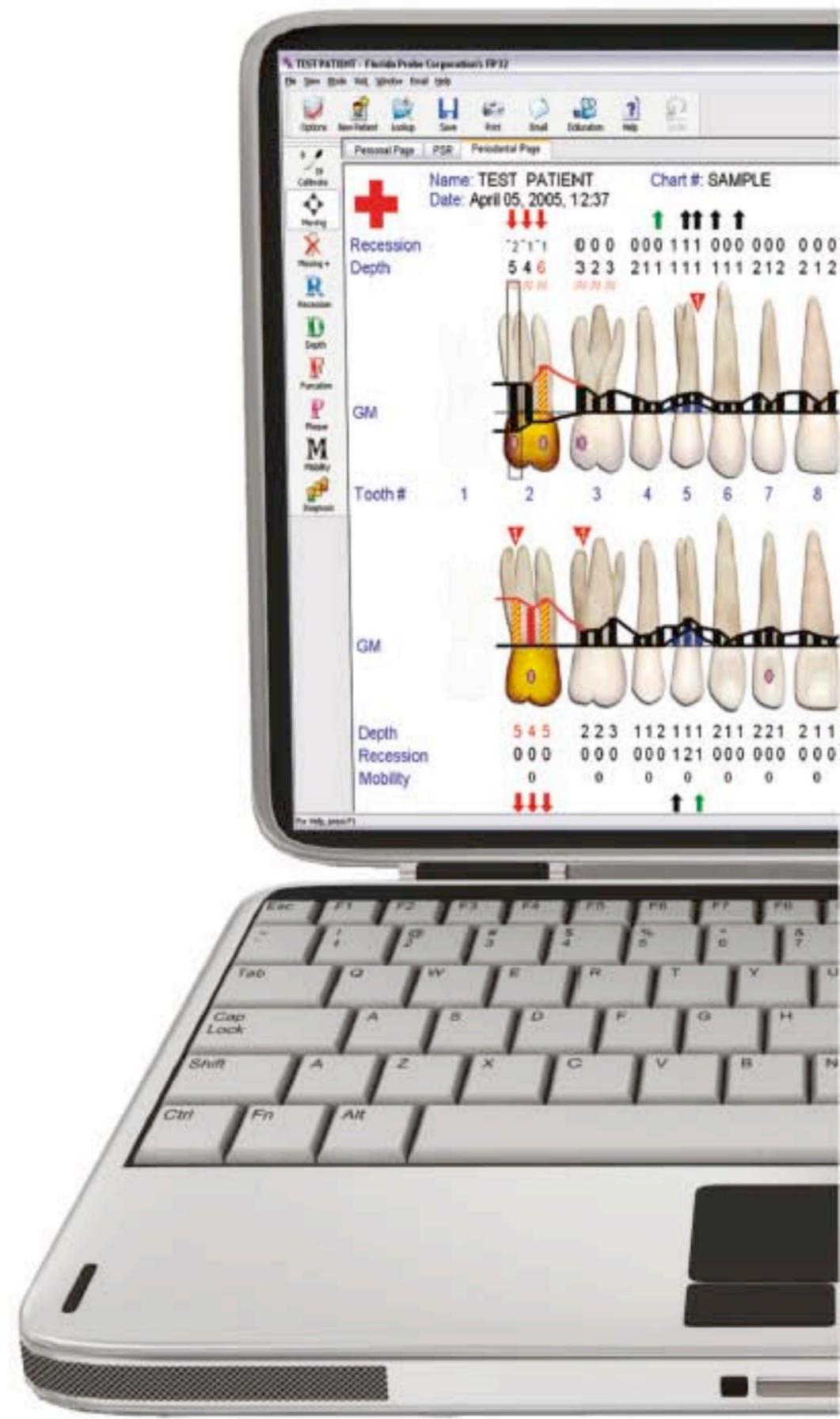



evoluciona

En el siglo XXI el examen periodontal anual es un standard, tanto para especialistas como para generalistas.

¿Qué hace de la SONDA FLORIDA líder de la industria dental en sondaje y registro gráfico?

La SONDA FLORIDA es un sistema "completo" e incluye un componente educativo para el paciente, análisis de datos y herramienta de asesoramiento de riesgo sanitario en revisiones. Nuestra sonda a "presión constante" es lo más exacto y reproducible en sondaje periodontal en la industria. También tenemos los periodontogramas más impresionantes visualmente del mercado. Nuestro producto, creado inicialmente para mejorar la exactitud de las mediciones en la investigación periodontal, continúa siendo el más usado en ese campo todavía hoy en día. Finalmente no hay quien nos supere en servicio post-venta, incluyendo actualizaciones del programa, apoyo técnico y protección garantizada.

SONDA FLORIDA. Lo último en sondaje periodontal digital y registro gráfico.



simplifica

Que el departamento de higiene sea rentable es clave para una consulta de éxito. Debería significar el 33% de sus ingresos totales.

¿Cómo hace la Sonda Florida que la productividad de su higienista se incremente simplificando el trabajo diario?

Nuestra sonda computerizada "habla" y registra datos para que usted no tenga que perder tiempo leyendo, adivinando, o sacando mediciones de sondajes. Dado que solo se necesita un operador para su uso, ya no es necesario quitar personal de otras funciones importantes. Como valor añadido, la medición en curso se compara automáticamente con las anteriores del mismo paciente en visitas previas, ilustrando claramente dónde hace falta un tratamiento. Nuestro periodontograma y otros gráficos pueden enviarse vía e-mail, imprimirse y archivarse digitalmente, lo que es ideal para gestión de aseguradoras, remisión a colegas y uso del paciente.

El programa no sólo es sencillo, sino que no requiere experiencia previa con ordenadores. La instalación, presencial, incluye instrucción y entrenamiento en el manejo con cada compra de un nuevo sistema Sonda Florida.

SONDA FLORIDA. Diseñada para incrementar la productividad vía simplicidad.

mejora

Proporcionar cuidados de calidad hace que aumente la receptividad del paciente a los tratamientos necesarios.

¿Cómo contribuye la Sonda Florida a mejorar la calidad de sus cuidados médicos al incrementar la aceptación del paciente de tratamientos para una enfermedad libre de síntomas?

La Sonda Florida significa la experiencia única de vivir un examen clínico que no es reproducible por otros medios. Además de nuestra sonda "políglota" el proceso de sondaje incluye cortos educativos y gráficos para el paciente. Todo combina para crear un ambiente interactivo, de alta tecnología, que no sólo educa, sino que prepara la actitud del paciente para aceptar, o sentir, la urgencia de recibir su tratamiento en los estadios tempranos de la dolencia.

SONDA FLORIDA. La diferencia en educación del paciente y en aceptación de presupuestos.





genera

Sonda Florida tiene el más rápido potencial de reembolso de la inversión entre los productos de alta tecnología del mercado dental.

¿Cómo asegura Sonda Florida el reembolso de su inversión y que su departamento de higiene sea un punto de rentabilidad?

La aceptación de tratamientos periodontales se incrementa entre un 15 y un 35% en el primer mes de usar la Sonda Florida. Hay clínicas que nos dicen que han recuperado su inversión en las primeras 4 semanas. Nuestra sonda utiliza la "presión constante" (todos los operadores aplican la misma presión) lo que incrementa la exactitud y reproducibilidad de cualquier sondaje. Ello implica que el dentista puede delegar el sondaje en su departamento de higiene y confiar en los datos resultantes. Plenamente. Dado que el dentista puede así facturar más por el tiempo de su clínica, los beneficios se manifiestan pronto. Disponiendo de los adecuados medios de tratamiento, una clínica con Sonda Florida puede aumentar sus ingresos de manera muy notable. Consúltense datos disponibles de usuarios.

Sonda Florida. Genera beneficios espectaculares sin sacrificio de la calidad de asistencia.

PFMF

Preguntas más frecuentes

¿La Sonda Florida y el sistema Go-Probe, son de activación por voz? No. La Sonda Florida adquiere los parámetros pisando el pedal cuando la sonda, manual, está en el punto adecuado. El Go-Probe adquiere los datos de cualquier sonda periodontal por un ratón inalámbrico. El programa FP32 usado en ambos tiene un esquema de voz personalizable para que el paciente pueda ir oyendo los datos que se van introduciendo en la ficha.

¿Cómo se usa el pedal? Las mediciones y demás informaciones quedan registradas al pisarse uno de los tres botones del pedal. El botón "deshacer" permite borrar y eliminar errores.

¿La Sonda Florida y el Go-Probe se usan sólo en las clínicas especializadas en Periodoncia? Desde que la exploración periodontal anual es un estándar en la salud dental tanto para especialistas como para generalistas, ambos sistemas vienen siendo ampliamente utilizados por éstos y también por higienistas.

¿Son compatibles sus programas de software con los pre-existentes en mi consulta? Sí. La mayoría de los programas de gestión son fácilmente conectables con el de la Sonda Florida y el Go-Probe.

¿Cómo se conecta el sistema Sonda Florida con mi ordenador? Mediante cable conector a puerto USB, incluido en el Sistema. El Go-Probe utiliza un pequeño receptor USB (conectable al puerto USB de su ordenador) para comunicarse con el ratón inalámbrico.

¿Funcionará el programa FP32 en la red de mi consulta? Sí, el programa FP32 (utilizado tanto en la Sonda Florida como en el Go-Probe) puede instalarse en cada ordenador de la clínica para visualizar los periodontogramas de los pacientes, recabar información, imprimir periodontogramas e informes o ver los videos educativos.

¿Qué parámetros de la enfermedad periodontal puede registrar el programa FP32? Los principales: profundidad de bolsa, sangrado, supuración, recesión, hiperplasia, furcación, placa, movilidad, espacio edéntulo, cambios en dentición, encía mínimamente o no adherida, MGJ, factores de riesgo y alertas médicas. Puede elegirse cuáles introducir, o no, a voluntad, incluyendo diagnósticos.

¿Qué tiempo necesito para aprender a manejar la Sonda Florida? El sistema se sirve con un día completo de instalación y enseñanza. Se habitúa uno a ello en diez pacientes y nosotros estaremos con usted en 3 ó 4 de ellos en el día de formación.

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un examen con la Sonda Florida? Una sola persona tarda la misma cantidad de tiempo que necesitan dos personas (una sondando, la otra tomando nota) para examinar con una sonda convencional (6-8 minutos). Un examen completo, entre 14 a 18 minutos. Al estar integrada en ordenador no puede ir más rápido, pero usted tiene la posibilidad de enseñar y motivar al paciente en la aceptación de la terapia de tejidos blandos, lo que incrementa el estándar de salud dental, producción y posibilidades de su consulta en general como un añadido.


¿Cómo se esterilizan las piezas de mano de la Sonda Florida? En autoclave. Cada unidad FP viene con 3 piezas de mano, de duración aproximada de 3 años cada una.


¿Qué requerimientos informáticos mínimos precisa el programa FP32 utilizado en ambos sistemas? Windows 2000 (SP4), XP (SP2 o 64-bit), o Vista; procesador Pentium III o equivalente AMD; 256MB RAM*; 2GB libres en disco duro; display color en resolución 1024 x 768 con color 32-bit; 1 puerto USB disponible (mejor, 3); los usuarios del Vista deben disponer de al menos 3GB RAM.

¿Cuántos sistemas se necesitan por cada higienista a tiempo completo? Si las higienistas sondan pacientes al mismo tiempo, hace falta un sistema por cada higienista. Hay otras soluciones, como las Docking Stations, a su disposición, sobre las que le informaremos en detalle a su requerimiento.

¿En cuánto puede estimarse el aumento de productividad de la clínica? Una consulta con sólo una higienista utilizando la Sonda Florida o el Go-Probe organizadamente puede incrementar notablemente los ingresos del capítulo Higiene. (Información suministrada por usuarios y remitida por el fabricante).

¿Tienen financiación disponible? Sí. Llámenos para información personalizada.

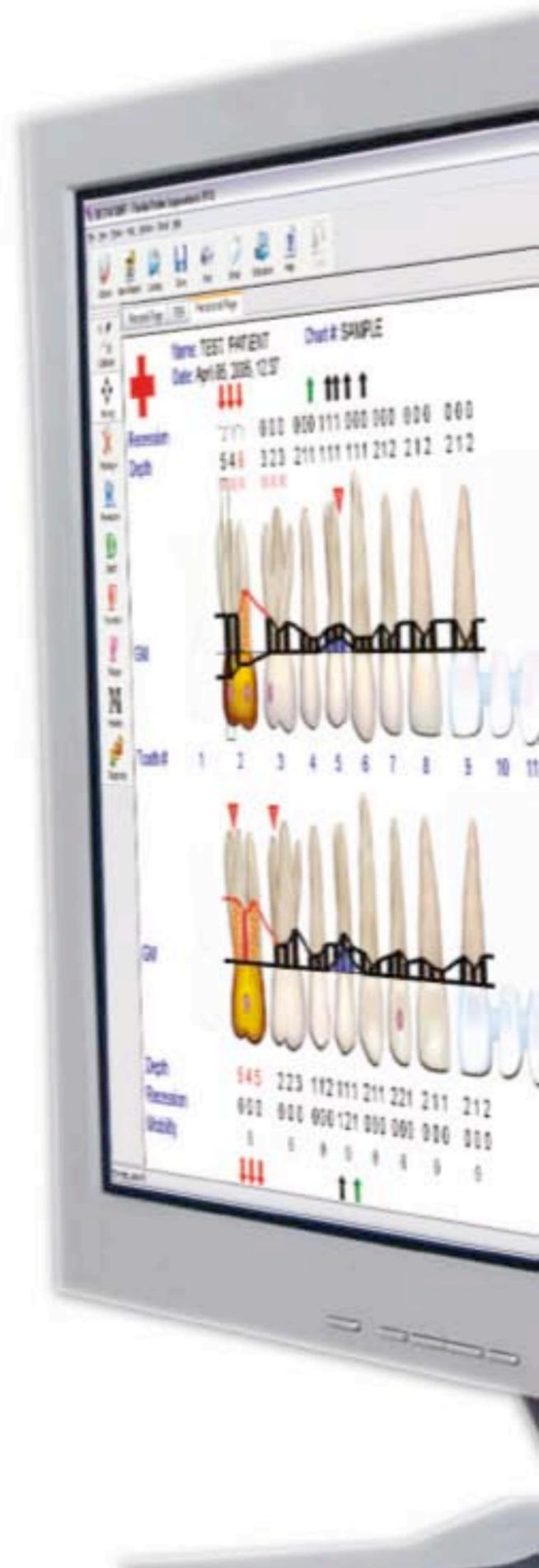

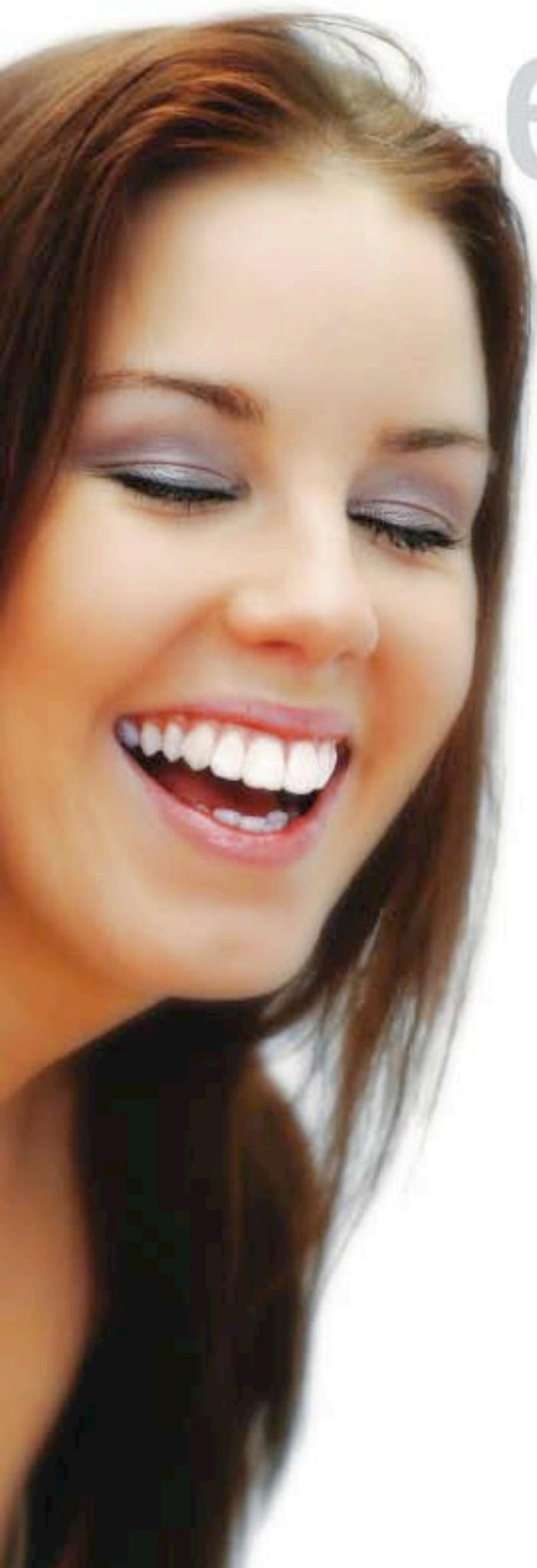

elogia

Sonda Florida se enorgullece de ayudar a tantos dentistas e higienistas a iniciar sus programas de Higiene y Periodoncia en beneficio de sus pacientes. He aquí lo que algunos usuarios comentan sobre nosotros:

"Llevo diez años usando la Sonda Florida en mi consulta. Es inestimable no sólo ahorrando tiempo, sino como un instrumento para hacer ver al paciente la necesidad de un tratamiento. No hay que darle vueltas". *Joseph P. Trovato DMD, FAGD.*

"Para mí, como terapeuta periodontal, la Sonda Florida fue la emancipación completa. Le ayuda al paciente a ser dueño de su condición periodontal, lo que mejora la aceptación del tratamiento. Me alivia el stress al no depender de otra persona para el registro y documentación de datos. ¡No tenía que esforzarme en convencer a la gente de la necesidad del tratamiento! Tomaban el control y la acción sobre su propia salud y yo podía proporcionarles la atención debida, lo que me satisface y estimula." *Shelly Short RDH, MS.*

La Sonda Florida es una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. La exactitud de este instrumento lo ha hecho indispensable en nuestra consulta. El paciente entiende sus evidencias periodontales por los colores que se muestran. La aceptación de tratamientos se ha incrementado notablemente con la Sonda Florida". *Tom M. Mc. Dougal DDS.*

"Mi principal tarea como higienista es ayudar a los pacientes a comprender que su enfermedad lleva no sólo a la pérdida de dientes, sino que afecta negativamente a su salud en general. La Sonda Florida facilita esta función educándoles en cada escalón del proceso; los mensajes de voz dando la profundidad y/o sangrado de las bolsas, el detalle de los gráficos visualizados, el material educativo imprimible y los videos, todo ayuda. Mis pacientes tienen mejor salud porque finalmente lo entienden y aceptan gustosos el tratamiento. La Sonda Florida le ha dado a nuestro departamento el mayor de retorno de la inversión efectuada, no sólo en términos económicos por el aumento de aceptación de tratamientos, sino en lo que de verdad importa. La salud de nuestros pacientes." *Debbie Chaderton, RDH*

"La Sonda Florida es el instrumento indispensable para descubrir la enfermedad periodontal y monitorizar su proceso de curación. Es una carta de navegación, fácil de usar, que lleva a buen puerto al profesional dental en la terapia periodontal" *Sam Low, DDS, MS, MEd.*

"Uno de los problemas más significativos de la dirección del caso en la terapia periodontal es la dificultad en evidenciar los logros clínicos. El otro, identificar pacientes cuyo estado clínico va en deterioro. Las actualizaciones más recientes de la Sonda Florida tienen la habilidad de trazar los cambios en profundidad de bolsa, nivel de inserción, sangrado al sondaje y otros parámetros diagnósticos. Como resultado, el clínico dispone de un modo calibrado y sistemático, de monitorizar la estabilidad periodontal. Este es uno de los mayores avances tecnológicos para afrontar, basados en la evidencia, el tratamiento de la enfermedad periodontal, por muchos años." *Casey Hein, RDH, MBA*

"En mi opinión, Sonda Florida es uno de los mejores ejemplos de toda una categoría de instrumentos diagnósticos digitales. Es más rápida y más precisa que el sondaje convencional y los pacientes la encuentran fascinante. Tiene, además, una característica que la pone al frente de toda la aparatología tecnológica: ¡Funciona! Larry Emmons, DDS

"Llevo usando la Sonda Florida casi 8 años. En comparación con otros periodontogramas digitales es la "regla de oro". Ningún otro programa de periodontogramas me ha facilitado tanto la educación de mis pacientes sobre su salud periodontal. Todos ellos quedan impresionados con el "ordenador que habla" que les da información personalizada sobre sus propias bocas. Si el paciente necesita terapia periodontal la aceptación de tratamientos se ha incrementado hasta el 95%. También me encanta que Florida Probe siga mejorando el software, haciendo "imbatibles" sus gráficos y su análisis de datos." Val Walser, RDH


"He utilizado la Sonda Florida más de siete años y me permite ayudar a mis pacientes a seguir sus progresos por terapia de la misma forma reproducible e irrefutable que muchos proyectos de investigación vienen utilizando". Stanley S. Levsky, DDS, MS

"Soy higienista itinerante y llevo conmigo un sistema Florida Probe a mis clínicas. No puedo contar con ayuda para hacer periodontogramas con la información recogida. Me siento a gusto con poder registrar, guardar e imprimir tantas copias como sean necesarias para las compañías de seguros, la clínica o el paciente con sólo mover mi pie. Los pacientes oyen las mediciones a medida que el higienista las hace. Este es un gran programa educacional. Tiene videos cortos para poner mientras hay que hacer otra cosa. Estos son sólo unos cuantos de los beneficios del programa que, además, es facilísimo de aprender". Joyce Spielter, CSA, RDH

"La Sonda Florida es una bendición para nuestros pacientes y para nuestra clínica. Es una sonda técnicamente muy fiable. Generalmente, el paciente periodontal no escucha a su dentista, pero escucha la voz de la Sonda Florida y vigila los gráficos diáfanos mostrando la profundidad de bolsa, sangrado, placa, etc. Tras una sesión de Sonda Florida los pacientes vuelven con una higiene tremendamente mejorada porque por fin comprenden la dinámica de la placa y la inflamación, y son ellos los que piden tratamientos. Nuestra proporción de tratamientos periodontales no quirúrgicos dio un salto del 100% desde 1999, cuando adquirimos la Sonda Florida. El valor real para el paciente es el de que al comprender antes y mejor su problema, actúa en consecuencia antes, evitando pérdidas de hueso." Dr. Ivan Budai, DDS

"He incorporado a mi protocolo periodontal la Sonda Florida hace unos dos años. Ahora puedo sondear y crear periodontogramas de mis pacientes cuando lo necesitan sin ayuda de nadie. Y no sólo eso. El programa FP es interactivo y engancha, lo que me ayuda a mantener interesados a mis pacientes en la enfermedad periodontal y su evolución. Mi vida profesional y las de mis pacientes han mejorado gracias a la Sonda Florida". Angie Stone, RDH, BS

"Llevamos usando la Sonda Florida más de 5 años y nos encanta. Nuestros pacientes comprenden que la usamos por su detalle y precisión y al mismo tiempo nos ayuda a formarles. Saben que cuando oyen la profundidad de una bolsa es insalubre y lo ven en la pantalla, fácil de relacionar y comprender. Mi personal quiere a su Sonda Florida porque ha simplificado nuestro papeleo diario, elimina inexactitudes y nos da información detallada para comparar. Ha acelerado las visitas de higiene y ha sido una tremenda adición para nuestra higienista". Brooks Haney, DDS

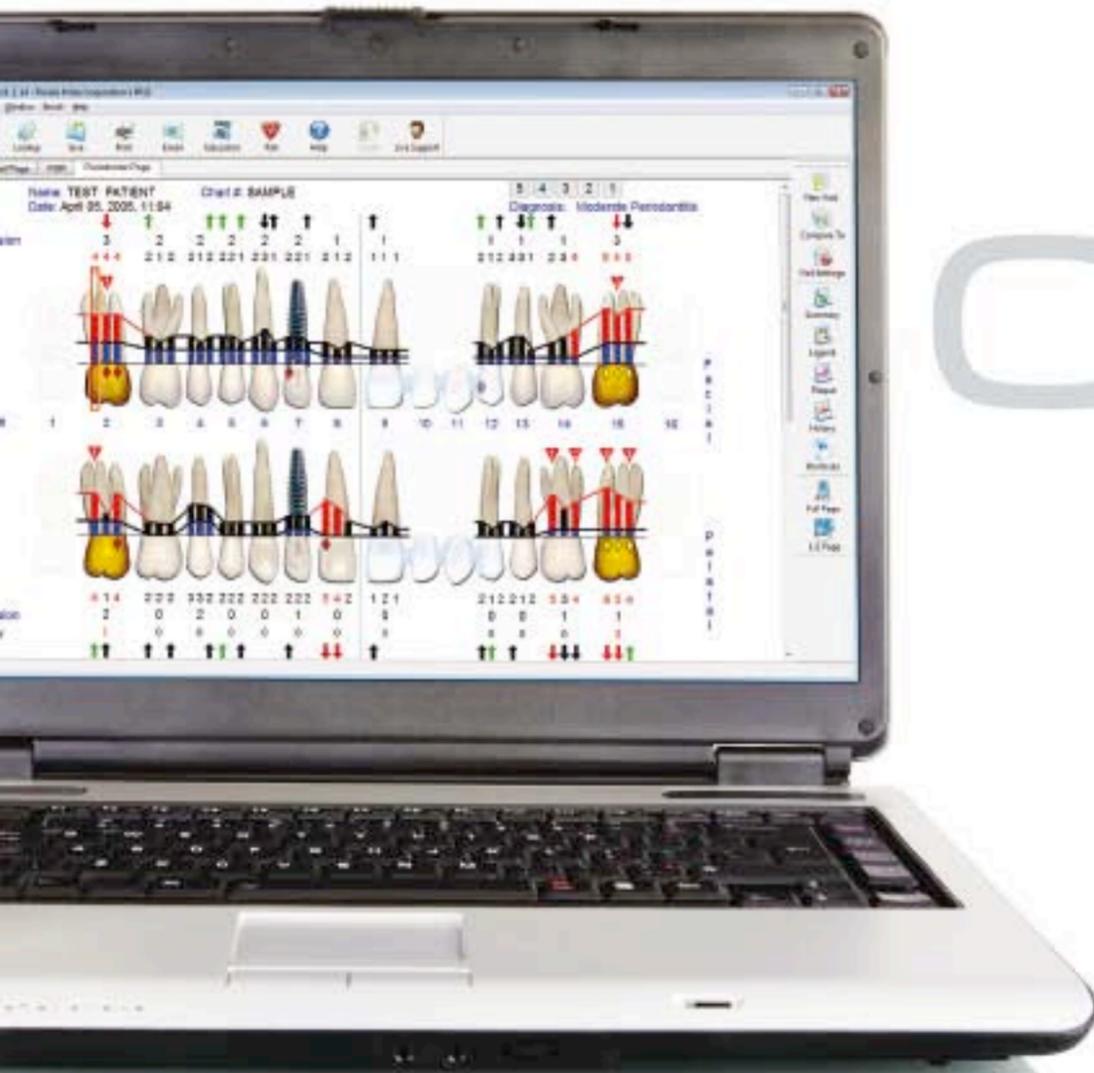

chart

El sistema GO-PROBE es a la periodoncia lo que la cámara intraoral es a la prostodoncia en cuanto a la aceptación de tratamientos por parte del paciente.

¿Qué es el sistema GO-PROBE?

Nuestro nuevo sistema Go-Probe incluye el mismo software de la Sonda Florida (FP32) pero le permite a Vd. incorporar cualquier sonda periodontal, con nuestro nuevo teclado numérico inalámbrico para introducir datos y grabarlos durante los exámenes periodontales. El sistema le va a generar una mayor aceptación de tratamientos por parte de los pacientes y más ingresos por el capítulo de higiene para su consulta. El teclado numérico es tan fácil de usar que se le puede pedir al paciente que lo haga y se involucre en el diagnóstico mientras usted sonda.

Entrada de datos rápida, inalámbrica • Funciona con cualquier sonda periodontal
Necesita un solo operador • Económicamente pensado para consultas generalistas



Cada sistema GO-PROBE incluye dos llaves, software y dos teclados inalámbricos.



GO-PROBE. Para los pacientes. Para su consulta.

go-probe

evoluciona

Sistema Sonda Florida

Incluye un día de instalación en el punto de uso y entrenamiento, Programa de software FP32 (red lista), 3 FP (sonda automática, computerizada) Piezas de mano, Pedal, interfaz USB, cable USB. Actualizaciones de software gratuitas durante un año desde la fecha de compra. Garantía de un año para todas las piezas. También incluye DVD de formación.

*portátil no incluido



*portátil no incluido



Docking Station

Cada docking station incluye: interfaz USB, cable USB, pedal de control. En cuestión de segundos una docking station permite sondear en otro gabinete. Simplemente pasando la sonda del principal a la docking station se puede empezar otro examen periodontal.

ficha

Sistema Go-Probe

Dé rienda suelta a la potencia del programa de software FP32 usando cualquier sonda del mercado. El nuevo Sistema Go-Probe incluye un programa completo de software de la Sonda Florida (FP32). Permite el uso de cualquier sonda periodontal y nuestro nuevo teclado numérico inalámbrico la entrada rápida de los datos. Un año de garantía, actualizaciones y apoyo técnico y educacional.

*Incluye 2 claves de software para estaciones periféricas y dos teclados numéricos inalámbricos. Pueden adquirirse sueltos bajo pedido.

*monitor no incluido.

NEW!



sonda

Piezas de Mano FP

Son ligeras, autoclaveables e incluyen una punta de titanio recambiable y un protector de puntas. Cada pieza de mano tiene un año de garantía y están diseñadas para esterilizar al vapor.

*Existen discos, stents, y piezas de mano CEJ de uso en investigación bajo peticiones especiales.



recambios

Probe Tips

Todas las puntas de recambio FP están hechas de titanio implantario y tienen 0,45mm. de diámetro. Las puntas son ligeramente flexibles para permitir el sondaje de dientes rugosos y cada una está marcada con rayas azules cada 3, 6 y 9 mm. Las puntas deben reemplazarse cada 6 meses en uso normal o cuando se doblen o el color se desvanezca.

*Hay puntas cortas, largas y de bola disponibles.





FLORIDA PROBE®

LEADING THE PERIO REVOLUTION

Distribuye UEDA EUROPA, S.A. - Telf: 952 06 06 20
www.ueda.es